

PROTOCOLE D'ADAPTATION ET D'UTILISATION

illustré par GPS 1.5 et DREAM FASHION**POWER**



Un **nouveau** logiciel pour
une nouvelle aide auditive
très puissante :

DREAM
FASHIONPOWER



ADAPTATION FACILITÉE

L'adaptation de FASHION**POWER** est facilitée par l'utilisation de la **version 1.5 de Compass GPS** et son tout nouveau **gestionnaire antiLarsen**.

En cas de besoin, un tableau spécifique additionnel permet une réduction ultérieure du Larsen grâce à un réglage manuel supplémentaire. Très intuitif et d'une efficacité redoutable, ce dernier agit sélectivement – et exclusivement – sur l'ensemble des fréquences sensibles à la rétroaction acoustique.



PUISSANCE ÉLEVÉE

Essayez FASHION**POWER** lors de vos prochains appareillages, chaque fois qu'une puissance élevée est indispensable.



APPAREIL ÉQUIPÉ DE LA **PUCE DREAM**

Avec une **puissance de crête de 138 dB SPL** et un **gain qui atteint 75 dB**, cette nouvelle aide auditive bénéficie de l'ensemble des atouts de la gamme DREAM :

- Niveau d'entrée jusqu'à 113 dB SPL
- Dynamique d'entrée de 90 dB
- Compatible avec la gamme DEX
- Transmission InterEar, Pavillon Virtuel, C.R.O.S.

WIDEX[®]
OUIE POUR LA VIE

Conseil d'adaptation AVEC COMPASS GPS 1.5



ÉTAPE
01

CHOIX DU FASHIONPOWER POUR PERTE ≥ 50 dB

Vous pouvez choisir FASHIONPOWER pour **toute perte à partir de 50 dB** – et jusqu'à 110 dB – car sa dynamique exceptionnelle le lui permet.



ÉTAPE
02

SENSOGRAMME

L'audiogramme, élément incontournable de l'appareillage, **peut être conforté par le Sensogramme**. Quoique non indispensable au sens strict du terme, ce dernier peut aider à parfaire un appareillage particulièrement complexe.



ÉTAPE
03

TEST ANTILARSEN

Après avoir installé l'aide auditive et l'embout définitif, vous allez effectuer le **test automatique de Feedback** (antiLarsen). Si l'embout est stable dans le conduit, on peut en espérer un comportement suffisamment correct vis-à-vis du Larsen, même quand un gain important est souhaitable.



ÉTAPE
04

VÉRIFICATION DE L'APPAREILLAGE

Le fonctionnement correct de l'ensemble ne pourra être **vérifié**, bien entendu, **qu'une fois l'appareillage terminé**, après que le malentendant se soit familiarisé avec son nouvel appareil.



ÉTAPE
05

RETOUCHE DES RÉGLAGES

Dans certains cas (par exemple, quand les embouts sont mal ajustés), après avoir constaté des incertitudes de fonctionnement répétées, **vous pourriez être amenés à retoucher les réglages**.

GESTIONNAIRE MANUEL GPS 1.5 DES RISQUES ANTILARSEN

NOUVEAU



Une commande unique, intuitive, permet de **réduire le risque en agissant uniquement sur les étendues fréquentielles les plus exposées**.



DANS LA GRANDE MAJORITÉ DES CAS, L'ANALYSE AUTOMATIQUE ANTILARSEN ACCOMPLIT EFFICACEMENT SA TÂCHE ; IL N'EST DONC PAS UTILE DE RETOUCHER SYSTÉMATIQUEMENT LES RÉGLAGES.

IMPORTANT

Ce nouvel outil, précieux pour l'obtention de résultats satisfaisants avec FASHIONPOWER, opère avec autant de succès pour toutes les aides auditives DREAM déjà existantes.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE.

WIDEX[®]
OUÏE POUR LA VIE